

# DISPOSITIFS D'AIDES TECHNIQUES À LA POSTURE EN MICRO-BILLES





LES COUSSINS DE POSITIONNEMENT PERMETTENT LA MISE EN PLACE SIMPLE ET RAPIDE DE DIFFÉRENTES POSTURES CONTRIBUANT NOTAMMENT À RÉDUIRE LA PRESSION EXERCÉE SUR LA PEAU ET LES TISSUS AU NIVEAU DES ZONES ANATOMIQUES À RISQUE D'ESCARRE.



## Pour une gestion durable des risques

- Soudures aux Ultrasons pour éviter la pénétration des liquides.
- Ions argent Ag+ par Sanitized® Silver contre le développement des micro-organismes.
- Enduction du PU-Polycarbonate sur maille Polyamide pour une durabilité supérieure.
- Certifié Oeko-Tex classe 2 pour un contact direct avec la peau.
- Microbilles en PES auto-extinguible pour sécuriser l'usage au lit des produits
- Principe Vacuum Touch™ pour une répartition stable des microbilles dans leurs protections

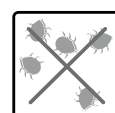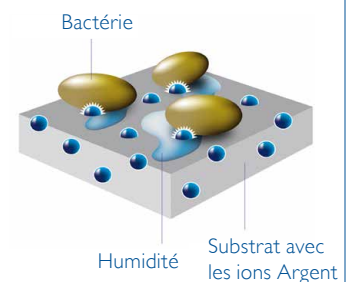

**PRÉVENIR LA CONSTITUTION D'ESCARRE AU NIVEAU DE LA RÉGION TROCHANTÉRIENNE**

Escarres peu fréquentes mais dangereuses apparaissant principalement chez les patients alités en décubitus latéral strict. Les experts recommandent la position en décubitus semi latéral à 30°.

• **La solution ASKLÉSANTÉ : le coussin de positionnement latéral 30°.**

- + 2 tailles pour une adaptation optimale à la taille des personnes.
- + Un oreiller intégré pour le confort de l'utilisateur.
- + Une installation facile, sans effort et rapide du patient.
- + Un maintien stable et durable.




**PRÉVENIR LA CONSTITUTION D'ESCARRES AU NIVEAU DES COUDES ET DES TALONS**

Escarres rares pour les coudes, elles sont fréquentes aux talons, principalement chez les patients alités. Les experts recommandent la mise en décharge totale des coudes et des talons en décubitus dorsal.

• **La solution ASKLÉSANTÉ : des plots de positionnement au niveau de la jambe et de l'avant bras.**

- + L'inclinaison sensible est favorable au retour veineux.
- + La bordure régulière du dispositif est non traumatique.
- + Pas de surpression au niveau du tendon d'Achille et des malléoles.
- + Soulagement de la pression d'appui au niveau des coudes.

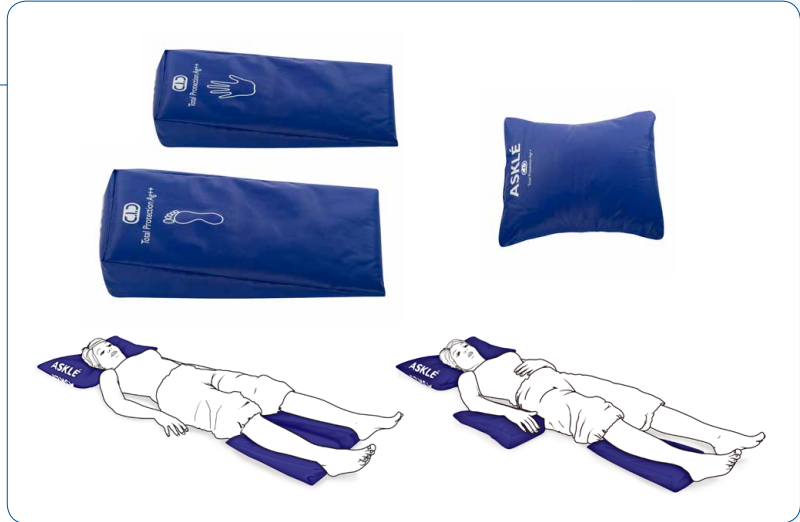

**PRÉVENIR LA CONSTITUTION D'ESCARRES AU NIVEAU DES MALLÉOLES ET DES GENOUX**

Escarres à fréquence élevée chez les patients présentant des rétractions musculo-tendineuses des membres inférieurs. Les experts recommandent l'abduction des membres inférieurs pour la décharge des malléoles, des condyles et des genoux. Décharger les zones sacrées, ischiatiques et talonnières.

• **La solution ASKLÉSANTÉ : le coussin cylindrique associé au plot d'abduction des genoux.**

- + Maintien des membres inférieurs en abduction.
- + Réduction de l'appui exercé au niveau des condyles fémoraux et des malléoles internes.
- + Protection des points de contact des genoux.





### PRÉVENIR LA CONSTITUTION D'ESCARRES AU NIVEAU DE LA RÉGION DU SACRUM, DES ISCHIONS ET DES TALONS

Escarres sacrées apparaissant chez les patients assis en position affaissée vers l'avant, ou chez des patients alités en position semi-assise inadaptée. Escarres ischiatiques fréquentes chez les patients assis. C'est l'escarre la plus fréquente chez la personne paraplégique. Les experts recommandent une position dite de type Semi Fowler pour décharger les zones sacrées, ischiatiques et talonnières.

#### • La solution ASKLÉSANTÉ : l'association de 4 coussins adaptés.

- + Réduction du « glissé avant » responsable du cisaillement des tissus.
- + Limite le risque de chute.
- + Alternative aux utilisations de lits non médicalisés.
- + Soulagement de la pression d'appui au niveau des coudes.



### UNE AIDE À LA PRÉVENTION DES POSITIONS VICIEUSES DES HANCHES ET GENOUX

LA FLEXION DES GENOUX SEULE

#### • La solution ASKLÉSANTÉ : le coussin cylindrique placé sous les genoux.

- + Réduit le creux lombaire.
- + Soulage les douleurs d'origine facettaires.

LE MAINTIEN STABLE DES HANCHES EN POSITION D'ABDUCTION

#### • La solution ASKLÉ SANTÉ : le coussin d'abduction de hanche.

- + Est indiqué en phase post-opératoire de prothèse de hanche.
- + Limite le risque de luxation d'une prothèse totale de hanche lors des retournements des patients.



### UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX BESOINS QUOTIDIENS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

#### • Les coussins universels T1 et T2.

- + S'adaptent à toutes les situations de soins (utilisés seuls ou en association).
- + Se substituent à l'usage dérivé des oreillers dans le respect de la prévention du risque de contaminations croisées.
- + Facilitent l'installation ou les retournements lors des actes de soins.
- + Présentent un encombrement réduit pour un rangement facilité.

