

PROCÉDURE D'UTILISATION

MAX **7**



max**n**son®

••••• PRÉPARATION DU MAX 7

1

PLACER LE TUYAU ADAPTÉ
À L'OREILLE GAUCHE OU DROITE



Bleu : Oreille gauche




Rouge : Oreille droite

••• La couleur est indiquée sur le tuyau •••

A


Emboîter le tuyau correspondant
à votre oreille

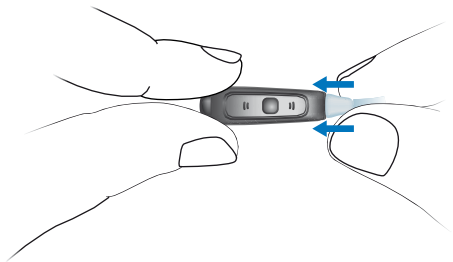




ATTENTION !

Vérifier que la tête du tuyau est bien alignée avec l'appareil

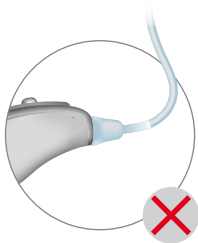


- B** Tourner **légèrement** le tuyau vers la droite pour le bloquer

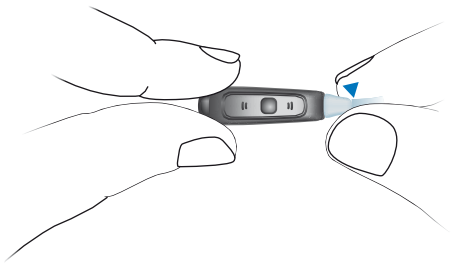


2

POUSSER L'EMBOUIT À LA TAILLE SOUHAITÉE

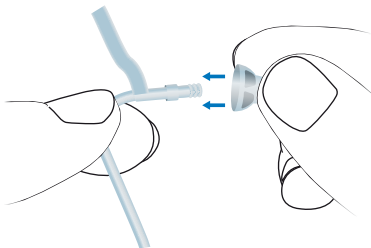


3

OUVRIR LE TIROIR À PILE
(TYPE DE PILE : 312)

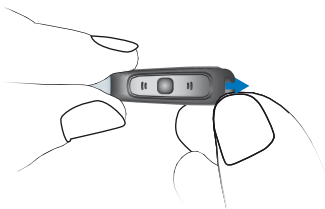


4

PLACER LA PILE DANS LE TIROIR

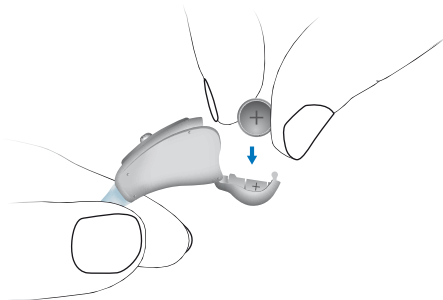


5

FERMER LE TIROIR À PILE POUR LA MISE EN MARCHÉ DE L'ASSISTANT D'ÉCOUTE

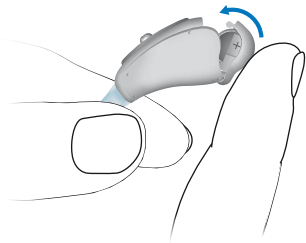


●●●●● DÉMARRAGE ET ARRÊT DU MAX 7

> POUR ALLUMER, FERMER LE TIROIR À PILE

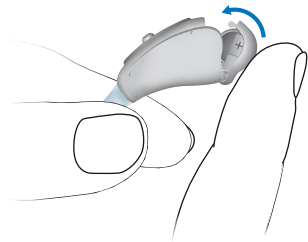


> POUR ÉTEINDRE, OUVRIR LE TIROIR À PILE

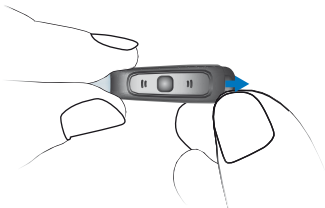

●●●●● MISE EN PLACE DU MAX 7


6A PLACER L'APPAREIL DERRIÈRE L'OREILLE

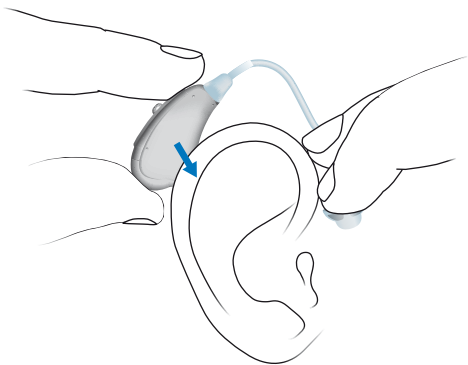


6B PLACER LE TUYAU DANS LE CONDUIT AUDITIF



- 6C** PLACER LE FIL DE MAINTIEN
DANS LA CAVITÉ EXTÉRIÈRE DE L'OREILLE
(CONQUE)

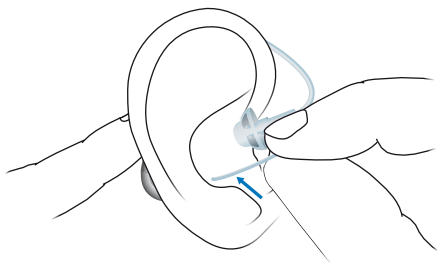


- 6D** POSITIONNER LE TUYAU LE LONG DE L'OREILLE
EN CONTACT AVEC LA PEAU

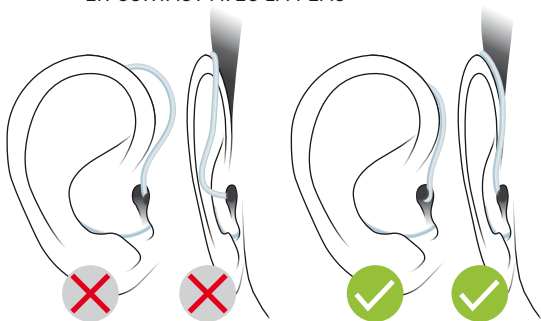

●●●●● RÉGLAGES DU MAX 7

POUSSER SUR LE BOUTON DE SÉLECTION DE PROGRAMME POUR AMPLIFIER LE SON

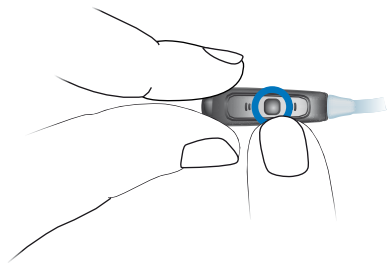

Le nombre de bip correspond aux différents niveaux d'amplification :

1 ^{er} bip	Faible
2 ^{ème} bip	Moyen
3 ^{ème} bip	Fort
4 ^{ème} bip	Adapté pour milieu très bruyant

••••● **ENTRETIEN DU MAX 7 À RÉALISER PAR LE CLIENT**

- › UTILISER LA PETITE BROSSE
POUR ENLEVER LE CÉRUMEN
- › NETTOYER L'EMBOUT AVEC UNE LINGETTE HUMIDE

••••● **SI LE MAX 7 NE FONCTIONNE PAS :**

- › Changer la pile
- › Enlever le cérumen dans le tuyau
à l'aide d'un fil de pêche