

AIDE VERSEUR DE GOUTTES

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation.
Le montage du produit ne nécessite aucun outil. Notice à conserver.

L'aide verseur de gouttes a été conçu pour faciliter l'utilisation du collyre.

Caractéristiques :

- Composition : ABS
- Dimensions : L. 5 x l. 5 x H. 11 cm

Installation :

Sortir le produit de son emballage et suivre les instructions.

Ouvrir le distributeur et placer la bouteille de collyre dans le distributeur comme indiqué (Fig.1).
Vérifier que la bouteille de collyre est adaptée au distributeur et correctement placée dans le compartiment principal du distributeur de collyre.

Fig.1



Fermer le distributeur. Un clic confirme la fermeture. Positionner l'aide verseur de gouttes comme indiqué (Fig.2) et vérifier qu'il est correctement placé. Effectuer une légère pression pour distribuer le collyre. Ce dernier se répartit facilement.

Fig.2



Les côtés pressoirs du distributeur et l'embout du haut sont amovibles pour faciliter l'utilisation du produit.

Attention : si la bouteille de collyre n'est pas correctement installée ou ne correspond pas à la taille du distributeur, ne pas utiliser le produit.

Conditions d'utilisation et sécurité :

Utiliser l'aide verseur de gouttes pour l'usage prévu.

Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien.

Tenir hors de portée enfants.

Entretien / sécurité :

Ne pas utiliser de produits d'entretien contenant des agents caustiques ou abrasifs.

Résolutions des problèmes rencontrés :

Défauts constatés	Solutions / comment résoudre le pb
Le distributeur ne ferme pas.	Le format de la bouteille de collyre n'est pas adapté.
Le collyre ne sort pas.	Vérifier que la bouteille de collyre est correctement placée et remplie. Effectuer une pression plus importante sur les côtés du distributeur.