


## Tapis d'amortissement Sécurform

Référence	Désignation
07/2900	Sécurform

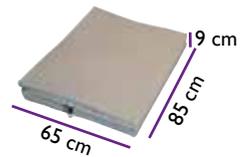

Poids 5 kg

### Principes d'utilisation :

Le tapis d'amortissement Sécurform s'utilise pour prévenir les blessures liées aux chutes du lit.

### Sécurité optimum :

- 60% de l'impact amorti
- Lanières de liaison avec le lit pour garantir le bon positionnement
- Dessous antiglisse
- Grande zone de couverture au sol : 195 cm x 85 cm
- Très bon confort : Grâce au Pharmatex et à la mousse viscoélastique
- Excellente stabilité en position debout qui permet de lever le patient tout en le protégeant en cas de chute.

### Confort des aidants :

- Permet aux aidants de ne plus enlever le tapis pour accéder au patient
- Seulement 3 cm de hauteur afin de limiter les risques de "croche-pieds"
- Déhoussable et lavable en machine
- Rapide à installer, facile à ranger et à transporter grâce à sa compacité et son clip de fermeture

### Conseils d'installation :

- Bien veiller à positionner les sangles sur une partie fixe du lit
- Ne pas marcher sur le tapis avec des chaussures à talons
- Ne pas laisser durablement la personne sur le tapis



### Composition :

- Mousse : Polyuréthane Viscoélastique 80g/m<sup>3</sup> – Classement au feu M4
- Housse : Pharmatex 60% Polyuréthane, 40% Polyester – Classement au feu CRIB 5
- Tissu anti-glisse : 57% Polyuréthane, 43% Polyester
- Boucles : 100% Acétal
- Sangles : 100% Polypropylène

### Entretien :

Le tapis d'amortissement Sécurform est déhoussable

Mousse : Eponge et eau savonneuse – Nettoyage : vapeur saturante sans ajout de formol.

Housse :



Conseillé à 60°C pour une bonne tenue du produit dans le temps

La housse ne doit être remplacée qu'une fois la mousse parfaitement sèche.

**Garantie :** Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat par le patient. La garantie n'est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions d'utilisation et d'entretien et dans la limite d'un usage approprié.

**Pharmaouest**  
PREVENTIX

Zone Actipole - BP 12 - 2, Rue de Saint-Coulban- 35540 MINIAC MORVAN  
Tél. +33 (0)2 99 82 21 21 - Fax +33 (0)2 99 82 15 45 - Fax Vert 0800 87 70 45  
[www.pharmaouest.com](http://www.pharmaouest.com) - [service.qualite@pharmaouest.fr](mailto:service.qualite@pharmaouest.fr)