

NOTICE D'INSTRUCTION

Fauteuil releveur Florence



Vitadomia

SOMMAIRE

Introduction	4
Utilisation prévue	4
Information sur le fauteuil releveur Florence....	5
Montage	8
Utilisation du fauteuil releveur Florence.....	12
Maintenance et entretien	14
Nettoyage et désinfection	15
Recyclage, après utilisation	15
Garantie	16

3/16

Introduction

Vous venez d'acquérir un fauteuil releveur Florence de la marque Vitadomia et nous vous remercions de votre confiance. Nous sommes sûrs qu'il vous apportera quotidiennement un maximum de confort. Vitadomia propose une large gamme de produits d'aide à domicile. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre revendeur pour de plus amples renseignements.


Utilisation prévue

Ce fauteuil releveur est préconisé pour les personnes ayant des faiblesses dans les jambes. Le fauteuil s'incline et met la personne dans le bon axe afin qu'elle puisse s'asseoir ou se relever sans solliciter l'effort de leurs jambes et de leur dos. Il est destiné à une utilisation en intérieur exclusivement.

2/16

Information sur le fauteuil

a. Description

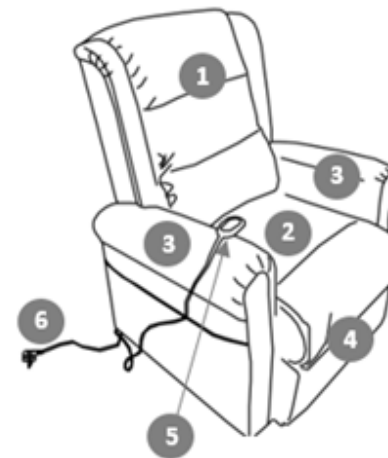

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 1 = Dossier | 4 = Repose-jambes |
| 2 = Assise | 5 = Télécommande |
| 3 = Accoudoirs | 6 = Câble d'alimentation |

	Raccord métallique	x2
	Roulette	x4
	Télécommande (5)	x1
	Transformateur (6)	x1
	Ligne électrique (6)	x1
	Rallonge	x1

5/16

Information sur le fauteuil

b. Contenu du carton


Vérifiez toutes les pièces afin de s'assurer qu'aucune pièce ne soit tombée à l'intérieur du carton pendant le chargement ou le déchargement.

	Dossier (1)	x1
	Assise (2)	x1
	Côté droit	x1
	Côté gauche	x1
	Boulon	x4
	clé Allen	x1


6/16

Montage

Le fauteuil est livré monté, à part le dossier et les roulettes. Suivre les étapes ci-dessous pour les monter.

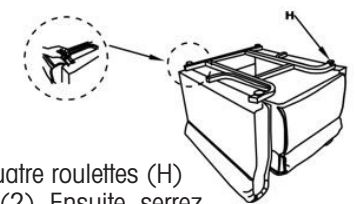

Etape 1 :
Fixez les quatre roulettes (H) de l'assise (2). Ensuite, serrez les roulettes.

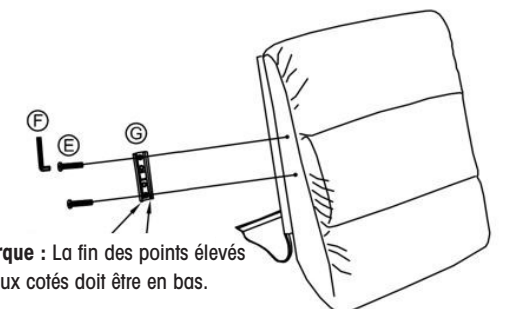

Remarque : La fin des points élevés des deux cotés doit être en bas.

Etape 2 :
Attachez le raccord métallique (G) au côté droit du dossier, utilisez la Clé Allen (F) pour bien serrer les deux boulons (E). Répétez la même opération de l'autre côté.

8/16

Fabricant

Castle Mark Entreprises LTD.
3F-1, No 842, Jing Kuo RD
Toayuan, Taiwan, ROC

Importateur distributeur

OXYPHARM S.A
39, Rue des Augustins
76178 ROUEN
FRANCE
www.oxypharm.fr

Version juillet 2018
Tous droits réservés, y compris traduction.
Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, sous quelque forme que ce soit (imprimée, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) sans l'autorisation écrite du publicateur, ni traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques.


© Vitadomia 2018

4/16

7/16


Etape 3

Pour assembler le dossier au cadre, glissez le crochet en métal (qui se trouve des deux côtés du dossier) dans l'emplacement prévu. Insérez fortement et jusqu'au «click» lorsque les crochets poussent les ressorts. Attachez la bande velcro (l'arrière du dossier) pour joindre la bande (sur l'arrière du siège)

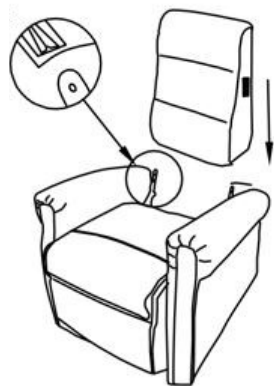

Etape 4


Attachez le côté gauche (D) au dossier, glissez le rochet métallique (qui se trouve des deux côtés) au raccord métallique du dossier. Répétez la même opération de l'autre côté.

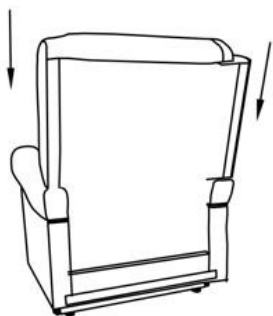


9/16

Etape 7

Connectez la ligne électrique (K) avec le transformateur (J).

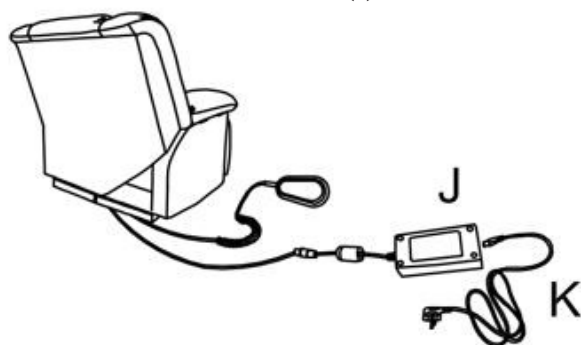

Rattachez la bande de velcro sur les deux cotés et à l'arrière du fauteuil.

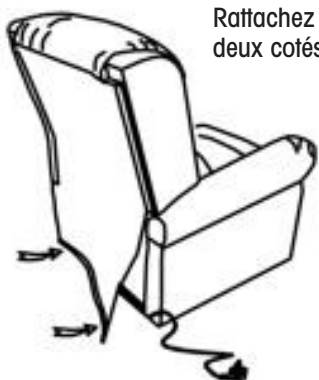

11/16

Utilisation du fauteuil releveur Florence

a. Avant utilisation

Avant toute utilisation, pour que le fauteuil releveur Florence puisse fonctionner correctement et en toute sécurité :

- Contrôler si toutes les vis sont bien fixées.
- Contrôler l'état du fauteuil releveur

propreté, déchirures, dommages au revêtement et/ou cadre...).

Pour garantir la bonne utilisation du fauteuil releveur Floride, il est important de lire les fonctionnalités et restrictions d'utilisation ci-dessous.

b. Utilisation

Ne pas dépasser le poids maximum autorisé, soit 150kg.

Seules les personnes informées peuvent utiliser le fauteuil.

Ce fauteuil releveur Florence est conçu pour être utilisé en intérieur dans un endroit sec.

Télécommande 1 moteur : appuyez dessus afin de mettre le fauteuil en position relax ou en position releveur.

12/16

Télécommande 2 moteurs : appuyez sur les 2 touches du haut pour l'inclinaison du dossier et/ou sur les 2 touches du bas pour la fonction relax et releveur.

ATTENTION

S'assurer qu'il n'y ait aucun obstacle, enfant ou animal près du mécanisme du fauteuil quand il est en marche afin d'éviter tout accident.

ATTENTION

Précautions à prendre en cas de changements des performances.

Si une fonctionnalité est défectueuse ne faites pas de réparations vous-même, contactez le revendeur pour connaître la démarche à suivre.

N'utilisez aucun dispositif défectueux !

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces conseils d'utilisation comme en cas d'utilisation anormale. Sont également exclus les risques consécutifs à une modification ou réparation du mécanisme par toute personne non habilitée par le fabricant.

13/16

Nettoyage et désinfection

Pour nettoyer ce fauteuil :

Utiliser exclusivement de l'eau chaude et des détergents domestiques normaux avec des brosses ou tissus doux. S'assurer qu'il n'y ait pas d'humidité dans les composants (tubes, électronique).

Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs tels que des solvants ni de brosses métalliques à poils durs.

Désinfection :


Toutes les pièces du fauteuil releveur peuvent être traitées avec un désinfectant.

Recyclage, après utilisation

Lorsque le fauteuil releveur Florence n'est plus utilisable, chacun de ses composants doit être trié en fonction de ses matériaux afin d'assurer un recyclage de celui-ci.



15/16

Remarque : Prendre la télécommande dans le sac

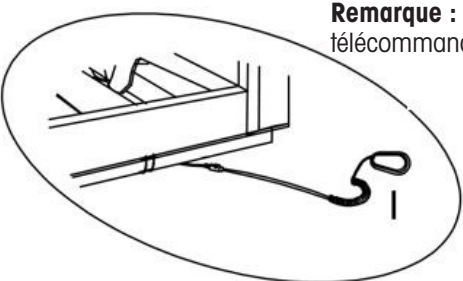

Etape 5

Cherchez le trou de raccord du motor, puis connectez la télécommande (I)

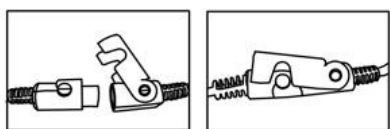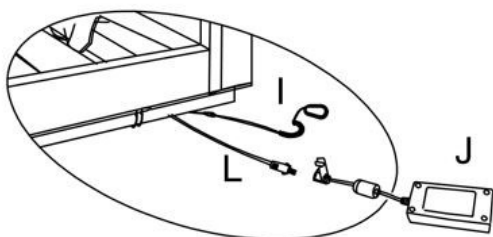

Etape 6

Cherchez l'adaptation dans le moteur, puis connectez la rallonge (L) avec le moteur. Ensuite, connectez la rallonge (L) avec le transformateur (J).

10/16

c. Stockage et manutention

En position assise, le fauteuil releveur touche le sol et peut être déplacé. Lors de l'utilisation de la fonction releveur, les roulettes sont bloquées et il est impossible de le déplacer. **Ne pas prendre le fauteuil releveur par le dossier ou les accoudoirs pour le déplacer, même sur une courte distance.** Cela pourrait déchirer les coutures. **Débrancher le fauteuil de la prise avant tout déplacement.**

Maintenance et entretien

Pour garantir une utilisation optimisée du fauteuil releveur Florence et une bonne performance, **vérifier régulièrement l'état du câble électrique. Si la moindre altération est détectée, ne pas utiliser le fauteuil releveur Florence.**

14/16

Garantie

La Garantie du fauteuil est de deux ans pour le moteur et d'un an pour toutes les autres pièces du fauteuil, (câble, télécommande, le tissus et le châssis).

Cette garantie est bien évidemment réalisée dans un fonctionnement normal de l'appareil et le respect des préconisations nommées ci-dessus.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des conseils d'utilisation cités dans ce manuel.

Sont exclus de la garantie :

- les dommages résultants d'accidents, de chutes ou de chocs,
- toute utilisation anormale du fauteuil,
- les dommages liés au contact de substances liquides ou autres sur le fauteuil,
- l'usure normale résultant de l'utilisation du fauteuil.

16/16