

Conseils d'utilisation

Le SISSEL® Balancefit® agit comme un plateau de Freeman classique mais de façon plus moderne : il est idéal pour améliorer l'équilibre et la coordination et pour renforcer la musculature. Ce coussin d'air en PVC est doté de picots qui stimulent la voûte plantaire et la sensibilité corporelle. Il peut aussi être utilisé pour des exercices en position assise. Le SISSEL® Balancefit® est un outil d'exercices idéal. Il peut être employé en complément du SISSEL® Balancefit® Pad, du Spiky Dome ou encore du SISSEL® Balance Board, pour un entraînement plus efficace à des degrés de difficulté différents et adaptés à chaque patient.

Domaine d'application

- ! Entraînement d'équilibre, amélioration de la coordination, correction des troubles de perception et musculaires,
- ! Stimulation ciblée des réactions proprioceptives,
- ! Entraînement préventif contre les risques de chute, surtout pour les personnes âgées, car plus agréable et plus stable qu'un plateau de Freeman traditionnel,
- ! Soutien thérapeutique au traitement des maladies neurologiques,
- ! Prévention et rééducation de l'instabilité et des malformations des articulations du genou et de la cheville.

Restrictions d'utilisation

- ! Patients avec un tonus musculaire limité,
 - ! Patients souffrant de maladies ou douleurs non diagnostiquées ou de fractures instables.
- Nous recommandons de consulter un médecin avant toute première utilisation.
Poids max. de l'utilisateur : 130 kg.

Matériel


PVC résistant, sans phtalates.

Nettoyage

Laver avec une lingette et un savon ou désinfectant non agressif.

Attention

Protéger de la lumière directe du soleil et éviter tout contact avec une source de chaleur. Il est possible de rajouter de l'air, pour varier la difficulté des exercices, avec une pompe à ballon courante disponible dans le commerce. Vérifiez avant chaque usage que le coussin n'a ni trous ni accrocs.

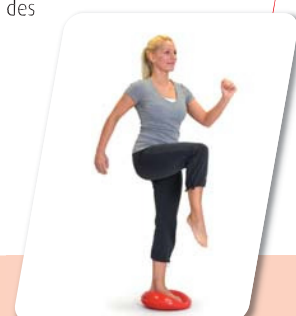

Sous réserve d'erreurs de composition et d'impression. Possibilité de changements de couleur, de matériau et de construction.

Gebbruiksvoorschriften

Net als een klassiek balansbord, zorgt de SISSEL® Balancefit® in een moderne uitvoering voor een verbetering van evenwicht, coördinatie en versteviging van het spierstelsel. Het met lucht gevulde kunststoffen omhulsel met noppen ter stimulatie van de voetzolen en verbetering van de gevoeligheid is ook geschikt voor zittende oefeningen. De SISSEL® Balancefit® is een goed combinatieproduct dat samen met de SISSEL®-producten Balancefit® Pad, Spiky Dome en het geavanceerdere Balance Board / Pro en balansbord een effectieve training in de nodige stappen verdeelt.

Toepassingsgebieden

- ! Evenwichtstraining, verbeteren van de coördinatie, verhelpen van gebrekkige lichaamsperceptie en aanhoudende musculaire evenwichtsproblemen,
- ! Voor doelgerichte bevordering van proprioceptieve reflexen
- ! Ondersteunt valpreventie, meer bepaald voor oudere gebruikers aangezien het comfortabeler en veiliger is dan een traditioneel houten bord
- ! Voor therapeutische ondersteuning van de behandeling van neurologische ziekten
- ! Voor de herstellende, voorbereidende en preventieve behandeling van instabiliteit van het sprong-en kniegewricht en misvormingen van de gewrichten.

Beperkingsvoorschriften

- ! Patiënten met beperkte aanpassingsmogelijkheden (functionele standaardisatie)
 - ! Patiënten met onduidelijke ziektediagnoses of klachten zoals instabiele breuken.
- Wij raden aan de oefeningen zelfstandig uit te voeren nadat u instructies gekregen hebt, of onder toezicht van medisch geschoold personeel. Belasting: max.: 130 kg.

Materiaal

robuust PVC, ftalaatvrij.

Reiniging

schoonwrijven met een vochtige doek met een milde huishoudreiniger of een in de handel verkrijgbaar ontsmettingsmiddel.

Opgelet

Direct contact met het zonlicht vermijden, niet op hittebronnen plaatsen. Met een in de handel verkrijgbare ballenpomp kan de druk en daardoor ook de moeilijkheidsgraad van de oefeningen eenvoudig verhoogd of verlaagd worden. Voor gebruik nagaan of alles intact is.



Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Kleur-, materiaal- en constructiewijzigingen mogelijk.

