


actiTENS

Dispositif médical connecté
pour soulager les douleurs chroniques.

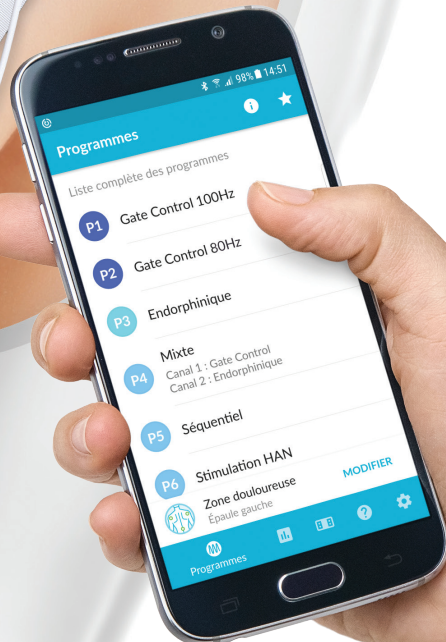

Avec le soutien de
La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes


SUBLIMED

VIVRE ET BOUGER AVEC actiTENS

20% de la population mondiale est touchée par les douleurs chroniques.

Il existe une solution non-médicamenteuse sans effet secondaire indésirable : la neurostimulation transcutanée (TENS).


Sublimed va plus loin avec **actiTENS** en travaillant avec les patients et les professionnels de santé des centres experts de la douleur pour la mise au point d'un TENS de nouvelle génération.



ERGONOMIQUE ET DISCRET

Invisible sous les vêtements, **actiTENS** accompagne en toute discrétion le patient dans ses activités quotidiennes en lui permettant un retour à la vie active.

actiTENS permet de stimuler toutes les zones du corps. **Miniaturisé, fin et flexible**, il est porté directement sur la personne et s'adapte parfaitement à la morphologie de chaque patient.

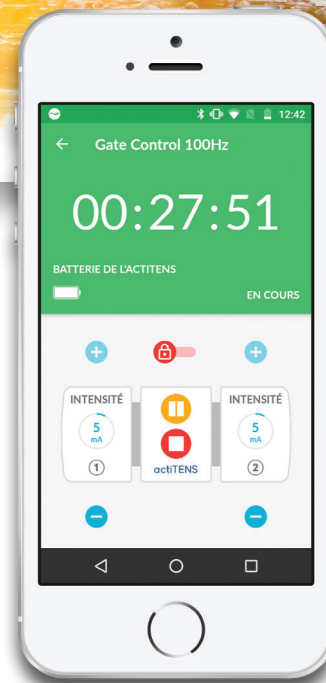


LANCEMENT D'UN PROGRAMME EN 15 SECONDES

Pilotage, via une connexion Bluetooth, de l'application **actiTENS** disponible depuis l'Appstore Apple ou le Playstore Android.

VÉRITABLE OUTIL DE DIALOGUE AVEC LE PROFESSIONNEL DE SANTÉ

Suivi de l'observance : enregistrement automatique et détaillé de l'historique des séances de stimulation.

Suivi pré et post séance du niveau de douleur.

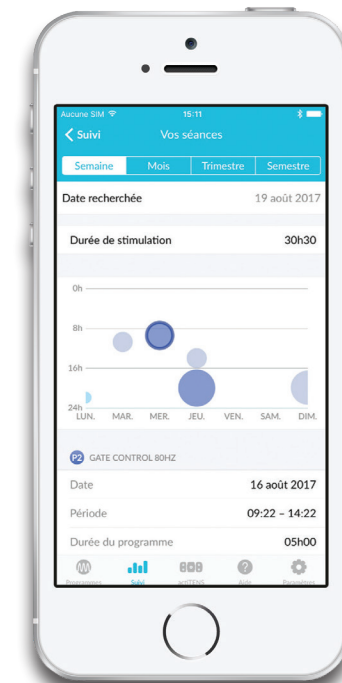

LES PROGRAMMES

- P1 Gate Control 100Hz
- P2 Gate Control 80Hz
- P3 Endorphinique
- P4 Mixte
- P5 Séquentiel
- P6 Stimulation HAN
- P7 Burst 2Hz
- P8 Modulation fréquentielle
- P9 Excito-moteur
- P10 Massage
- P11 Frottements
- P12 Zones sensibles
- P13 Nausées
- P14 Nerf vague

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Canaux : 2 canaux indépendants

Batterie : Li-Ion, avec une autonomie de l'ordre de 20h

Tension de sortie : max 60mA (1000Ω) / max 60V

Dimensions **actiTENS** : 108 mm x 53,5 mm x 17 mm

Poids **actiTENS** : 64 g

Système de classification & IP de l'**actiTENS** : IP22

Forme d'onde : ondes biphasiques asymétriques compensées

Largeur d'impulsion : 50-400µs ± 5µs

Fréquence : 1-120Hz ± 10%

Durée des séances : de 10 à 720min réglable via l'application mobile

Câbles : 3 longueurs possibles (14cm, 40cm et 100cm)



actiTENS est un dispositif médical soumis à contre indications.
Lire attentivement la notice **actiTENS** avant la première utilisation.



SUBLIMED

9 rue du Rocher de Lorzier
38430 Moirans • France
+33 (0)4.76.37.17.58

www.subli-med.fr